



# Guía de paciente

**Pertenece a:**

Icare HOME (modelo: TA022)  
GUÍA DE PACIENTE  
TA022-035 ES-3.1

# Introducción

Esta guía le mostrará cómo usar el tonómetro Icare HOME.

Asegúrese de leer atentamente todas las instrucciones de esta guía antes de usar el tonómetro.

## Índice


Visión de conjunto del tonómetro .....	4
Preparación del tonómetro para el uso ...	6
Posicionamiento del tonómetro .....	8
Cómo completar la medición .....	10
Solución de problemas .....	12
Sustitución de las pilas .....	14
Limpieza del tonómetro .....	16

## Cómo obtener asistencia

Si tiene cualquier pregunta o problema relativo al tonómetro Icare, visite Icare en:  
**[www.icaretonometer.com](http://www.icaretonometer.com)**

# Visión de conjunto del tonómetro

## Parte delantera

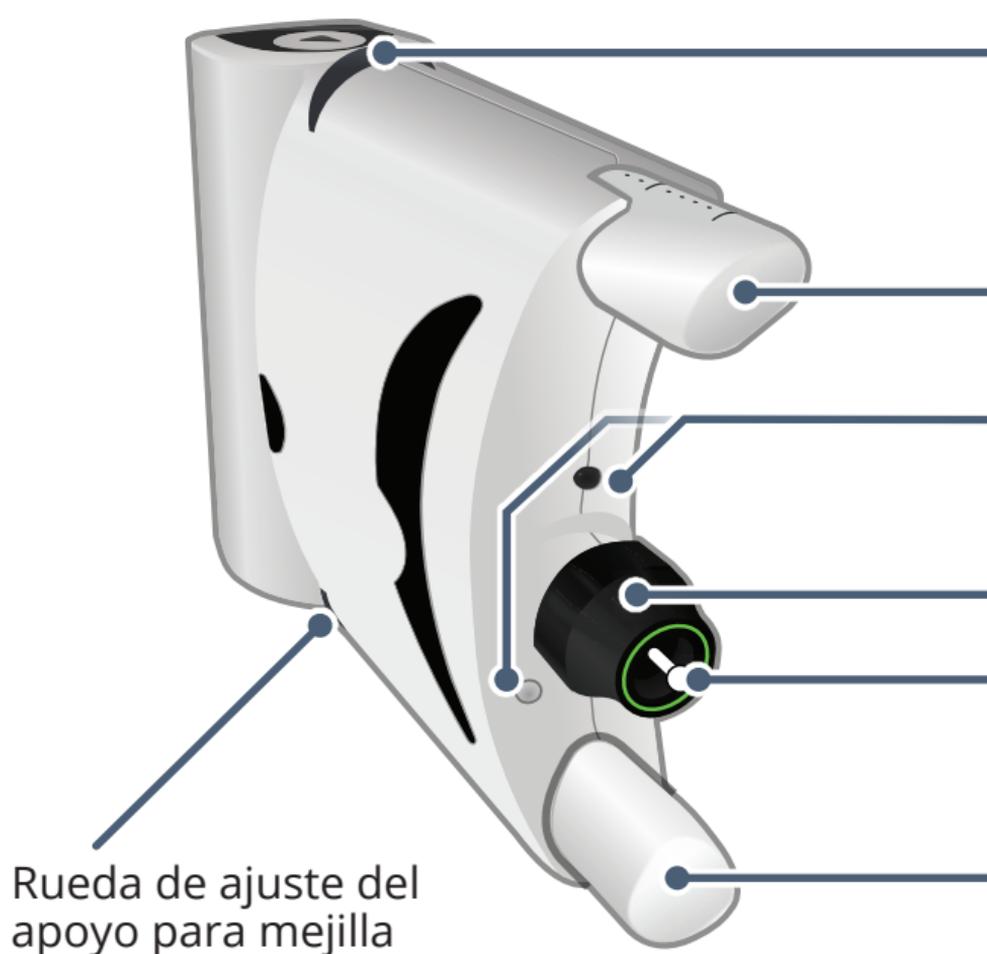


## Parte posterior



- Rueda de ajuste del apoyo para frente
- Apoyo para frente
- Sensores de detección de ojo (detectan qué ojo se va a medir)
- Base para sonda (con luz indicadora)
- Sonda
- Apoyo para mejilla

## Parte inferior

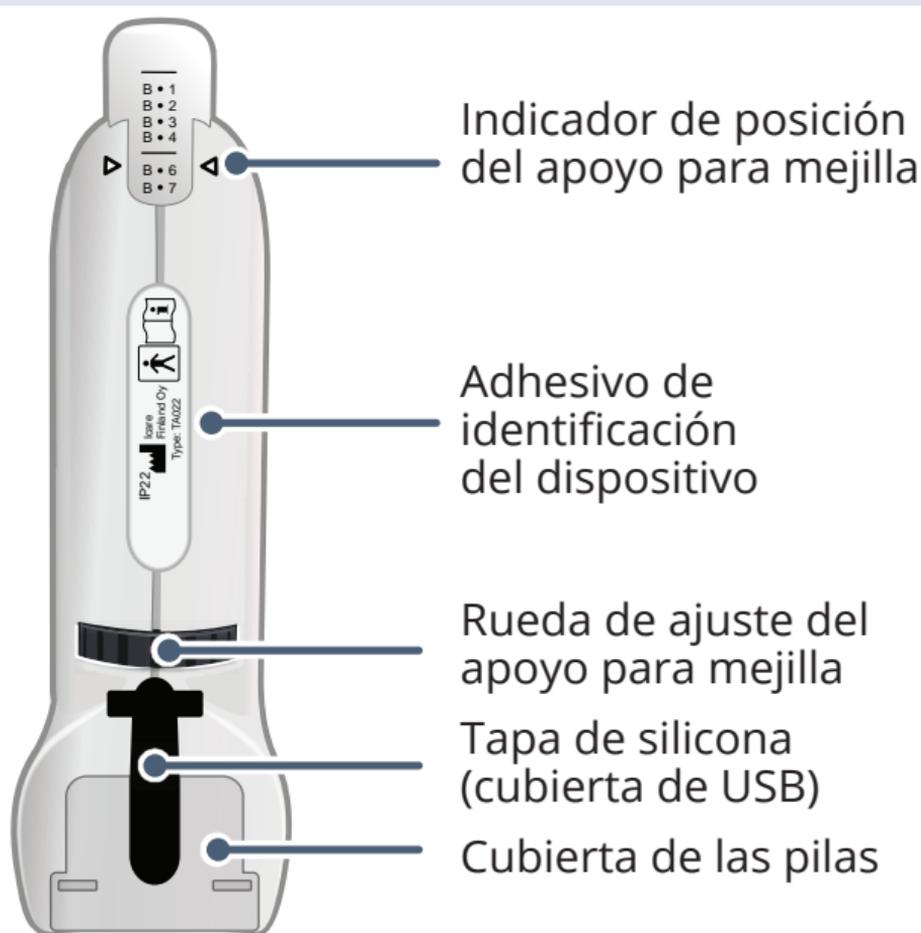

# Preparación del tonómetro para el uso

- 1 Asegúrese de que las posiciones de apoyo en la frente y la mejilla coinciden con las posiciones que su oftalmólogo anotó para usted en la etiqueta de posiciones de apoyo.**

Encontrará la etiqueta de posiciones de apoyo en la caja de transporte. En caso necesario, gire las ruedas de los apoyos para ajustar los apoyos a las posiciones correctas.

- 2 Pulse y libere el botón de encendido  para encender el tonómetro. Todas las luces indicadoras del panel posterior parpadearán una vez y escuchará un tono breve.**

El indicador LOAD (Carga) seguirá parpadeando para indicar que el tonómetro está listo para cargar la sonda.

- 3 Tome una nueva sonda y abra el paquete.**



## **CUIDADO:**

- Utilice únicamente sondas originales y certificadas, producidas por el fabricante del dispositivo.
- No toque la sonda.




- 4 Quite la tapa del envase de la sonda, deje caer la sonda en la base para sonda y pulse brevemente el botón Measure (Medir)  (1 segundo).**

El indicador MEASURE (Medir) parpadeará cuando el tonómetro está listo para medir.



## **CUIDADO:**

- No toque la sonda.
- No apunte el tonómetro hacia abajo.
- No utilice la sonda si ésta toca cualquier superficie no estéril, como una mesa o el suelo.

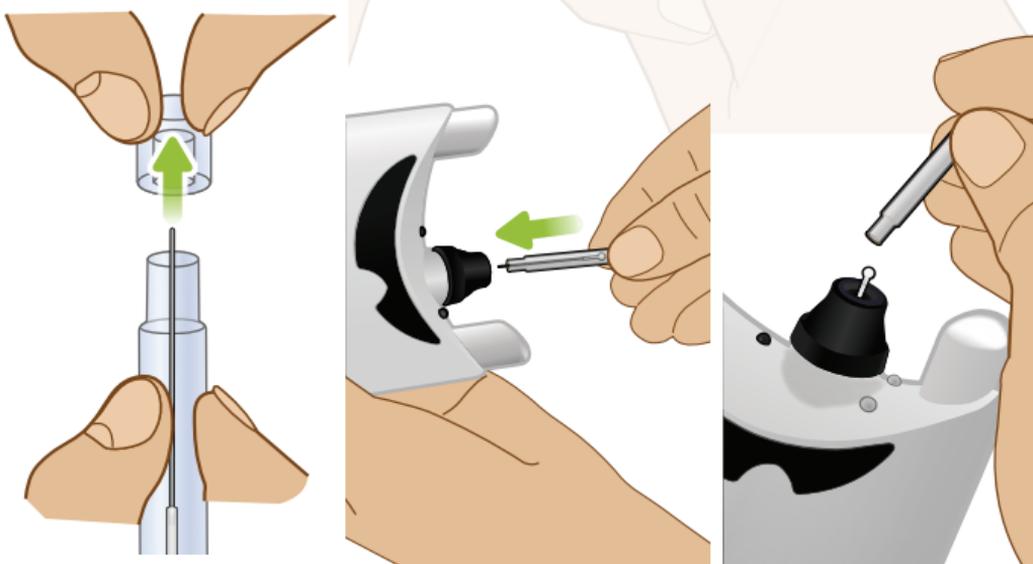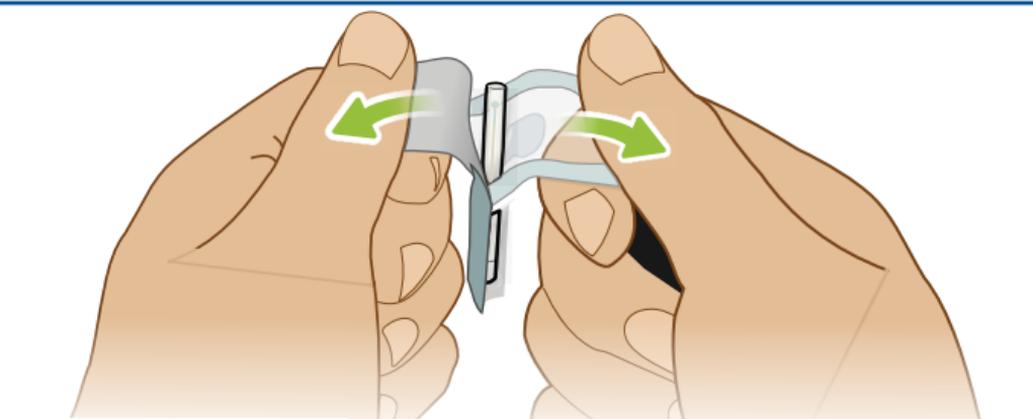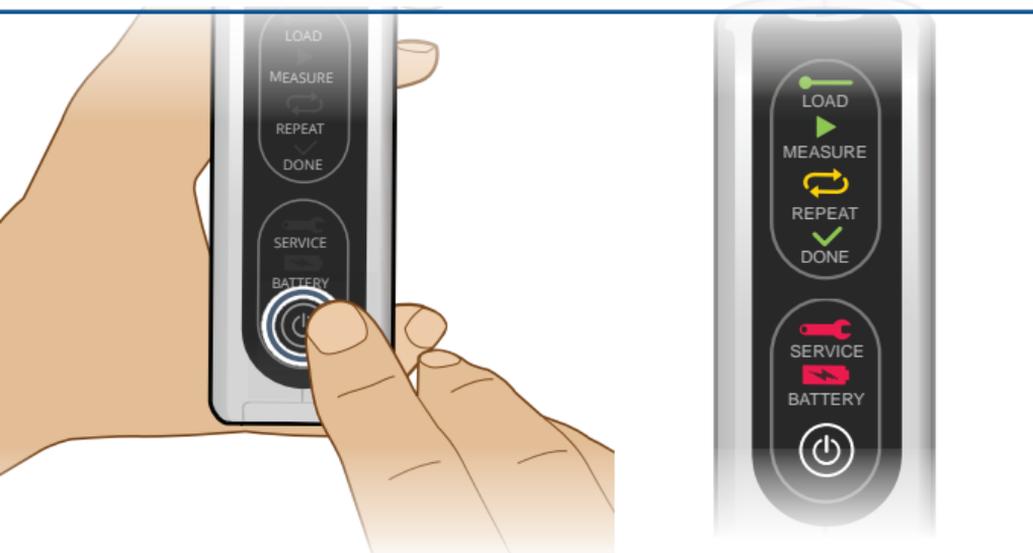

# Posicionamiento del tonómetro

- 5** Sitúese frente a un espejo y sostenga el tonómetro lateralmente frente a su rostro.

 **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el tonómetro no entre en contacto con sus ojos.

- 6** Alinee la punta de la sonda con el centro de la córnea y gire el tonómetro hasta que la punta de la sonda apunte en línea recta hacia la córnea.

 **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el tonómetro no entre en contacto con sus ojos.







 **CUIDADO:** No tape los sensores de detección de ojo.

- 7** Asegúrese de que la luz de la base para sonda muestre el color verde.

Si la luz de la base para sonda presenta el color rojo, asegúrese de que está mirando en línea recta hacia el frente (es decir, con la mirada formando un ángulo de 90° con el cuerpo) e incline el tonómetro hasta que la luz de la base para sonda cambie al color verde.

- 8** Asegúrese de que la sonda esté centrada a la altura de la mirada para garantizar que la sonda toque el centro de la córnea durante la medición.

Si la sonda no está centrada a la altura de la mirada, repita los pasos 5 y 6.

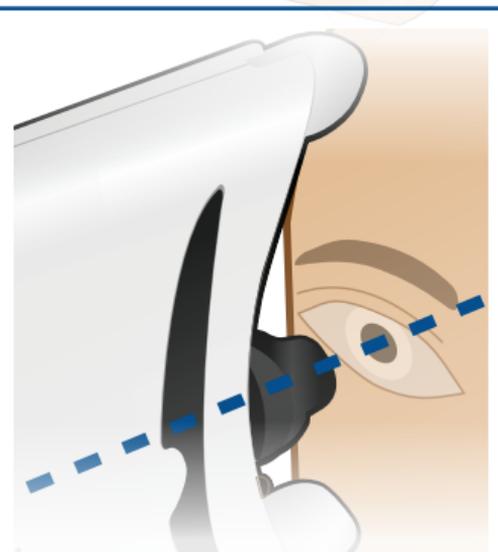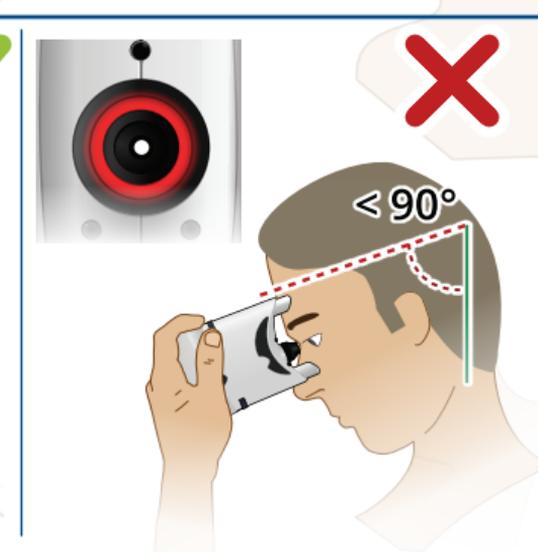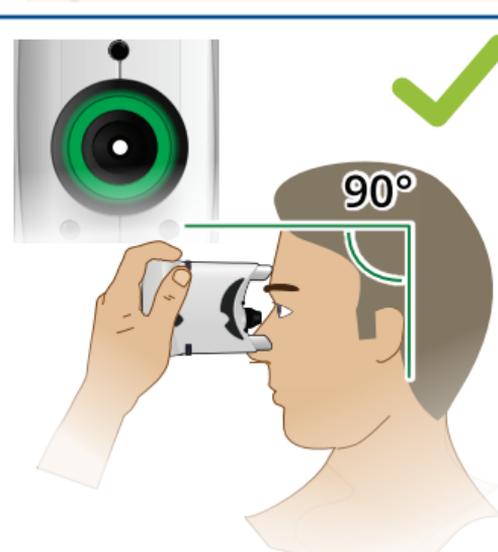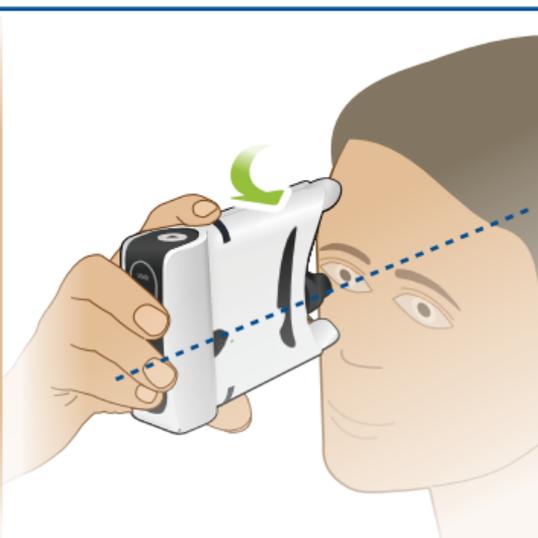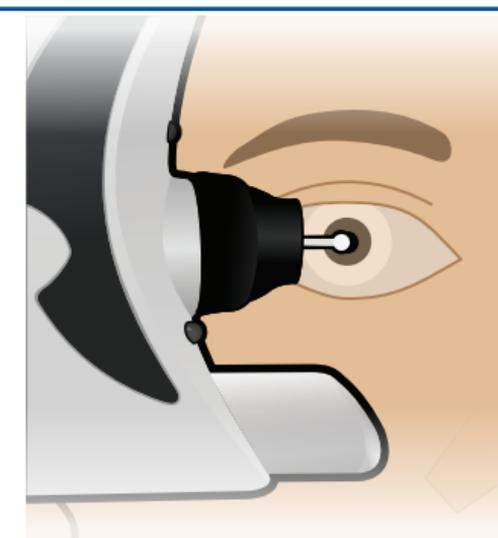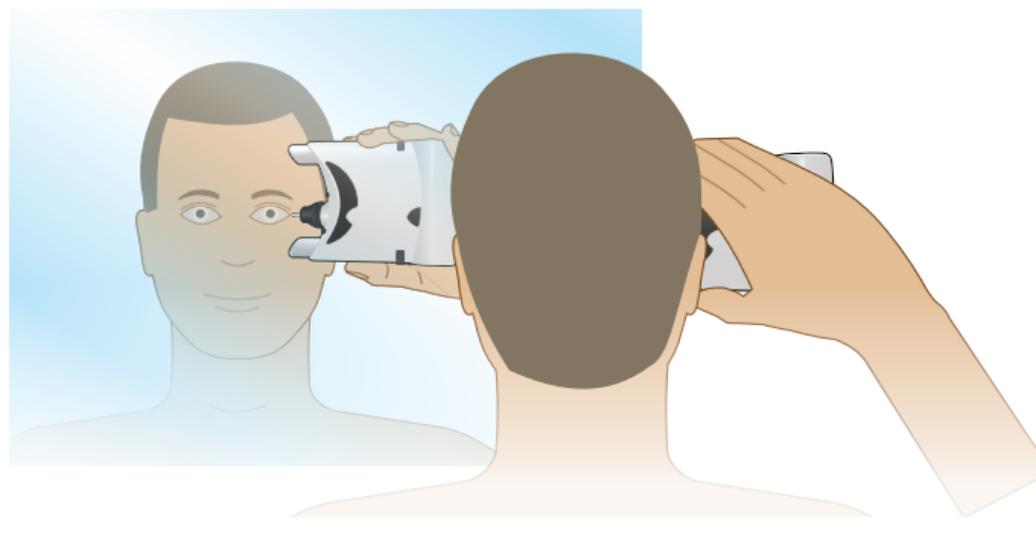

# Cómo completar la medición

**9** Pulse el botón Measure (Medir)  para medir la presión (la sonda contactará con el ojo durante las mediciones).

Pulse y mantenga pulsado el botón para obtener 6 mediciones una tras otra, *o bien*

pulse brevemente el botón (1 segundo) 6 veces para obtener una medición cada vez.

**10** Cuando la medición finaliza correctamente, escuchará un tono largo, la luz de la base para sonda se apagará y la luz Done (Hecho) se encenderá.

Deseche la sonda introduciéndola de nuevo en su envase y eliminándola correctamente.




**CUIDADO:** Si se produce un error, pulse brevemente (1 segundo) el botón Measure (Medir) y continúe con la medición.

**11** Si su médico le pide que mida los dos ojos, repita los pasos del 1 al 10 con el otro ojo.

**12** Después de completar todas las mediciones, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido  hasta que escuche 3 tonos breves.

**i** **NOTA:** El tonómetro se apagará automáticamente si no se utiliza durante 3 minutos.

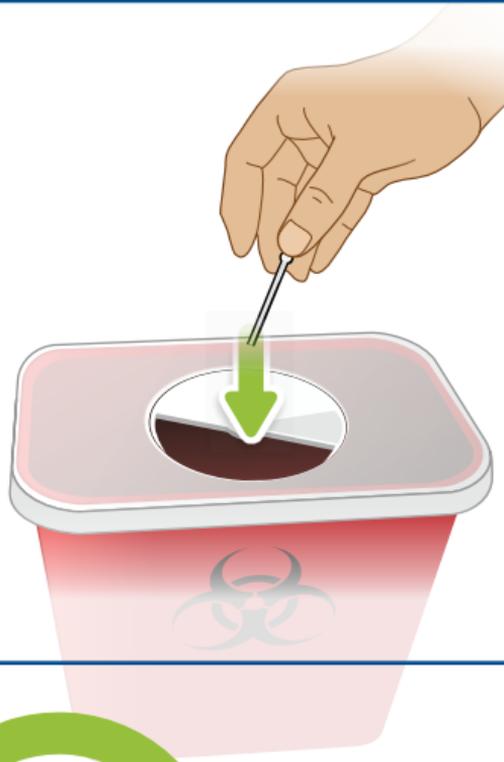


BELOUGS TO: John S.

SUPPORT POSITION	LEFT EYE	RIGHT EYE
FOREHEAD	A6	A7
CHEEK	B3	B3

icare

**Pasos 1-10**

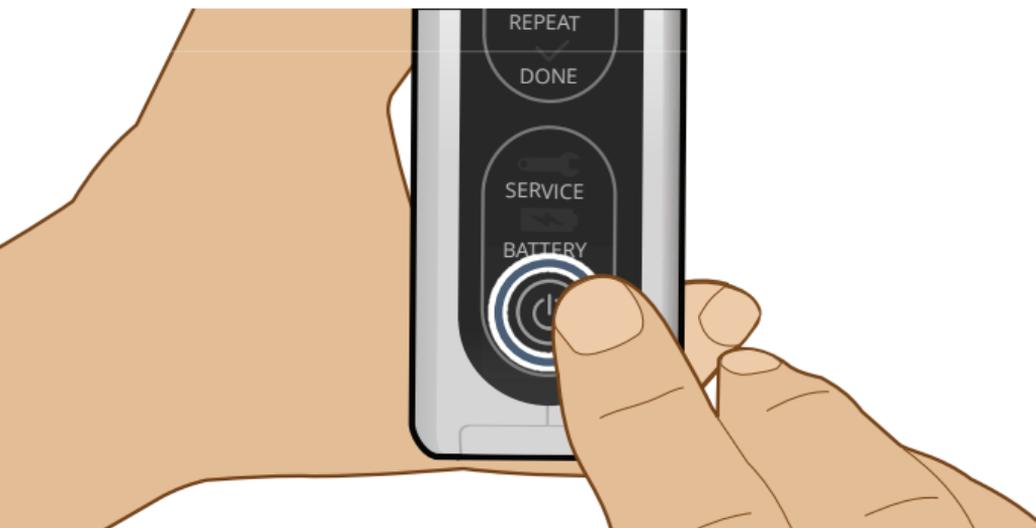A patient data card is shown with handwritten information. The card includes a section for 'SUPPORT POSITION' with rows for 'FOREHEAD' and 'CHEEK', and columns for 'LEFT EYE' and 'RIGHT EYE'. A large green circular arrow graphic is positioned to the right of the card, with the text 'Pasos 1-10' written inside it.

## Mensaje de error



**Base para sonda en rojo continuo.**

*Causa: el tonómetro no está recto.*



**La base para sonda parpadea con el color rojo, la luz Measure (Medir) se apaga y se escuchan 2 tonos**

*Causa: el tonómetro está demasiado lejos o demasiado cerca del ojo, o no está recto.*



**La base para sonda parpadea con el color rojo, la luz Repeat (Repetir) parpadea y se escuchan 2 tonos**

*Causa: demasiada variación entre las mediciones o fallo de detección del ojo.*



**La base para sonda parpadea con el color rojo, la luz Service (Servicio) parpadea y se escuchan 2 tonos**

*Causa: base para sonda sucia o dañada, o sonda sucia. El tonómetro requiere servicio técnico.*



**La luz Battery (Pila) parpadea**

*Causa: las pilas tienen poca carga.*

## Solución

1. Asegúrese de que está mirando en línea recta hacia el frente (es decir, con la mirada formando un ángulo de 90° con el cuerpo).
2. Ajuste el ángulo de inclinación del tonómetro hasta que la luz de la base para sonda cambie al color verde.

1. Pulse el botón Measure (Medir)  para borrar el error.
2. Ajuste la posición del tonómetro.
3. Repita la medición.

1. Pulse el botón Measure (Medir)  para borrar el error.
2. Asegúrese de que ni los sensores de detección de ojo ni el lado de la sien del ojo estén tapados.
3. Repita la medición.

Contacte con el proveedor del tonómetro para solicitar servicio técnico para el tonómetro.




Cambie las pilas.

Encontrará instrucciones en las páginas 14-15.

# Sustitución de las pilas

- 1 Levante la tapa de silicona de la cubierta de las pilas y deslice la cubierta para abrirla.**
- 2 Retire las pilas gastadas e inserte 2 nuevas pilas de litio CR123A.**

Asegúrese de que el polo positivo (+) de las pilas esté orientado hacia la cubierta de las pilas.
- 3 Deslice la cubierta de las pilas para colocarla en el tonómetro e inserte la tapa de silicona en el puerto USB.**

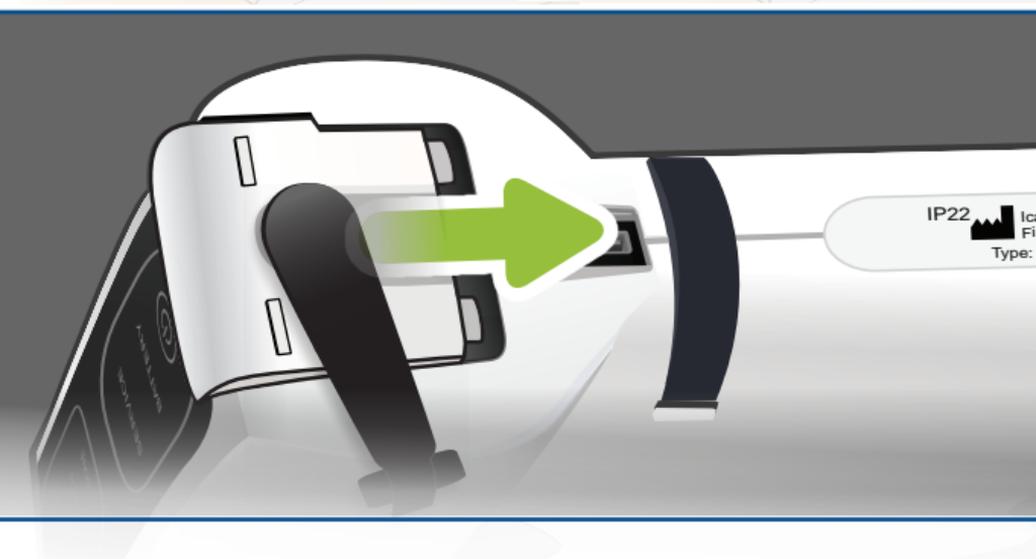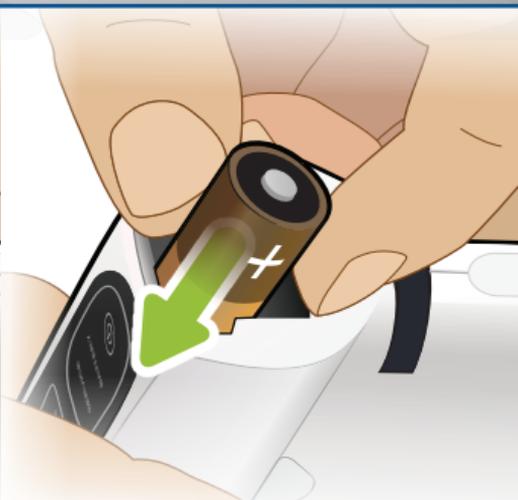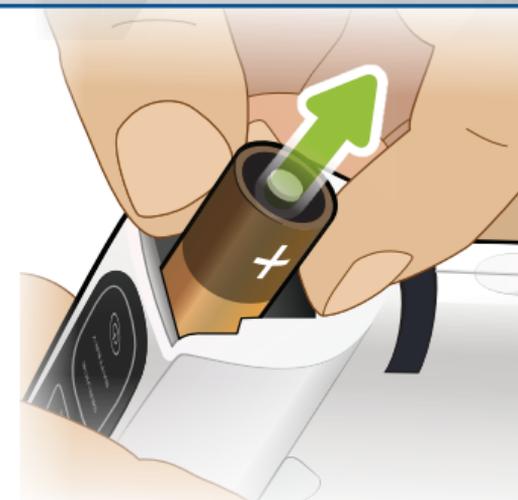



# Limpieza del tonómetro

- 1 Humedezca levemente un paño o una toallita de papel con agua.**  
Asegúrese de eliminar el exceso de agua del paño o la toallita de papel.

- 2 Limpie el tonómetro con el paño o la toallita de papel humedecidos.**

 **CUIDADO:** No sumerja el tonómetro en agua ni ningún otro líquido.

 **NOTA:** Cualquier servicio de mantenimiento, excepto el cambio de las pilas y la limpieza, deben ser realizados por el fabricante o por un centro de servicio certificado.

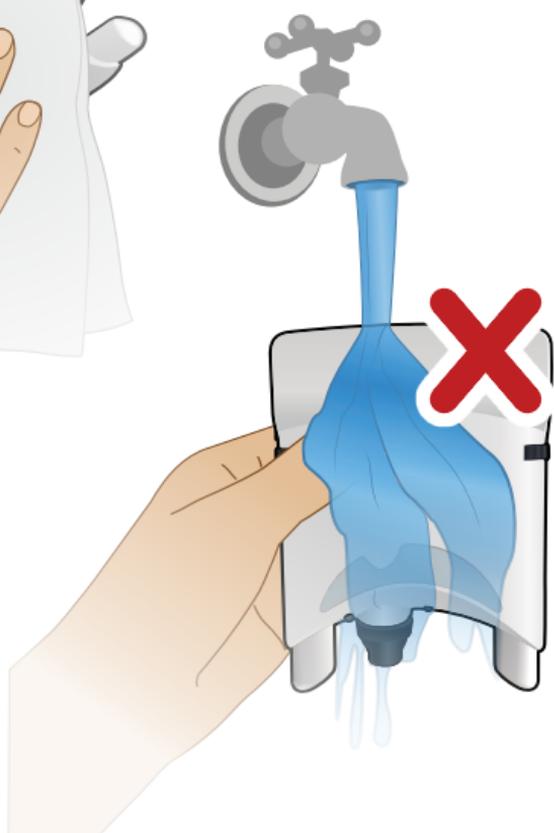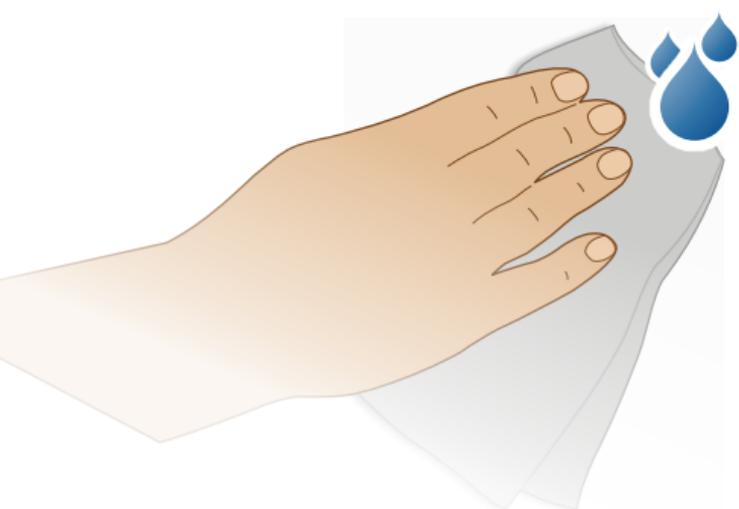

**icare**

measuring  
excellence