

# ENCUENTRE, ALINEE Y CONFIRME

Repita los 3 pasos para obter su refracción. Asegure el NETRA con ambas manos, las palmas envolviendo la parte inferior del equipo para soporte.

1

Mueva la perilla derecha para localizar el paraguas rojo y verde, de forma que se puedan ver lo más completas y brillantes posible.



2

Mueva la perilla izquierda y alinee las líneas mayores, para que se superpongan lo más próximo posible.



3

Presione el botón (✓) cuando termine.



Repita los pasos 1, 2 y 3 ocho veces por ojo hasta que vea la marca de verificación azul en la pantalla.